

Askina® Finger Bob®

Einfacher Fingerschnellverband



In seiner Form wird der Askina® Finger Bob® auf die Spitze des verletzten Fingers gesetzt.



Der Askina® Finger Bob® wird über den Finger abgerollt.



Nun wird er am oberen Ende in beliebiger Richtung eingedreht (eine Umdrehung genügt).



Jetzt nur noch das eingedrehte Ende abrollen. Fertig ist der Schnellverband.

Askina® Finger Bob®

- › In Sekunden applizierbarer Verband
- › Für jede Fingergröße und -stärke geeignet
- › Zur sicheren Fixierung von Wundauflagen
- › Patentiert
- › Weiß oder farbig (rot, blau, pink, rosa, orange, grün)

Material

- › Baumwolle-Viskose-Mischung
- › Länge:
Standard 180 mm, Large 220 mm
- › Durchmesser:
Standard 12 mm, Large 17 mm

Askina® Finger Bob®	Abmessung	VE	PZN	REF
weiß	180 mm Länge	50 Stück	6874705	9044000
farbig	180 mm Länge	50 Stück	6874711	9044019
weiß	180 mm Länge	6 Stück	6965023	9044027
farbig	180 mm Länge	6 Stück	6965017	9044035
farbig, Large	220 mm Länge	25 Stück	0050653	9044159

